

Handbuch

Inhalt

Erste Schritte	3
Lieferumfang	3
ichó	3
Fernbedienung	3
Ladekabel	3
Plek	4
Farbaufkleber	4
Bedienung.....	4
Einschalten	4
Ausschalten	4
Not-Aus.....	4
Menü	5
Play/Pause	5
Vor und Zurück	5
Lauter und Leiser	5
Hell und Dunkel	5
Multifunktionstasten.....	5
Menü	5
Profilmenü	5
Anwendungsmenü	6
Aufladen	6
Außenhülle lösen.....	7
ichó Support	8
ichó geht nicht mehr an	8
Die Fernbedienung funktioniert nicht.....	8
Pflege.....	9
Allgemeine Informationen und Spezifikationen.....	9
Sensoren.....	9
Material	9
Funktechnik	9
Haptische Rückmeldung.....	9
Leuchtmittel	9

Akku.....	9
Speicher.....	10
Warn- und Sicherheitshinweise	10
Warnhinweise.....	10
Sicherheitshinweise.....	10
EU-Konformitätserklärung	11
Starteranwendungen.....	13
Profil 1	13
Spektrum	13
Ratespiel - Bauernhoftiere	13
Drehorgel – Mix.....	14
Märchen - Der Froschkönig	15
Akkord	15
Profil 2	16
Reise Reise.....	16
Sprichwörter – Lebensweisheiten	16
Stadt Land Fluss.....	17
Knacks.....	17
Klanglandschaft - Wald.....	18
ichó individualisieren über die agora	19
Kundenkonto anlegen	19
ichó registrieren	19
Anwendungen auswählen	19
ichó individualisieren.....	20
Zusammenfassung.....	21
Liefer- und Zahlungsinfo.....	21
Bestellabschluss.....	22
ichó einschicken	22

Erste Schritte

Wir freuen uns sehr, dass du dich für **ichó** entschieden hast und er dich von jetzt an im Pflegealltag begleiten wird. Intelligent, interaktiv und individuell kannst du nun dein Betreuungsangebot gestalten. Nimm dir vorab einen Moment Zeit, das Handbuch und insbesondere die Sicherheits- und Warnhinweise sorgfältig zu lesen.

Um durch die einzelnen Anwendungen und Menüs von **ichó** zu steuern, brauchst du die **ichó** Fernbedienung. Hast du beides griffbereit, kann es losgehen

Lieferumfang

ichó

Dein **ichó** besteht aus einem Innenkern, der die gesamte Technik schützt und einer wechselbaren Außenhülle, die sich leicht reinigen lässt. Vor der ersten Inbetriebnahme empfehlen wir **ichó** vollständig [aufzuladen](#).

Wie unsere Erde hat **ichó** auch einen Nord- und einen Südpol, also ein Oben und ein Unten. Dies ist wichtig für verschiedene Funktionen und Anwendungen. Am Südpol hat die Außenhülle viele kleine Löcher, damit die Klänge aus dem Lautsprecher gut zu hören sind. Gegenüberliegend ist der Nordpol. Wenn **ichó** abgelegt wird, liegt er meist auf dem Nordpol, da er so nicht einfach wegrollt. Genau dort, unter der geschlossenen Fläche, befindet sich die einzige Taste am Ball, die im Regelbetrieb genutzt wird.



Rund um den **ichó**, an der breitesten Stelle, verläuft der Äquator. Wenn icho eingeschaltet ist, erkennt man an dieser Stelle umlaufende Lichter, die der [Menüführung](#) dienen und in den verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden.

Fernbedienung

ichó wird überwiegend über die Fernbedienung gesteuert. Einige Funktionen, wie zum Beispiel das [Einschalten](#) und die [Not-Aus](#)-Funktion erfolgen direkt am Ball.

Die Fernbedienung unterstützt alle Anwender dabei, **ichó** im Pflegealltag zielgerichtet einzusetzen. Sie funktioniert über Bluetooth, sodass die Steuerung von **ichó** auch über Hindernisse hinweg möglich ist.

Die Fernbedienung ist bereits so vorbereitet, dass sie direkt mit deinem **ichó** verwendet werden kann.

Ladekabel

Bei der Auswahl des Ladekabels haben wir Wert darauf gelegt, dass dieses besonders strapazierfähig und leicht zu bedienen (USB-C) ist, um den Anforderungen des täglichen Gebrauchs gerecht zu werden. **ichó** darf ausschließlich mit dem zugehörigen Ladekabel geladen werden (56k Ohm Widerstand). Das Ladekabel kann mit jedem handelsüblichen USB-Netzteil verwendet werden.

Plek

Das Hilfswerkzeug unterstützt dich beim Lösen der Außenhülle vom Innenkern, ohne diese zu beschädigen. Eine Anleitung, wie du das am geschicktesten machst, ist im Abschnitt [Wechseln der Außenhülle](#) beschrieben.

Farbaufkleber

Möchtest du deinen **ichó** farblich kennzeichnen, liegt hierfür ein Farbaufkleber-Set. Den farbigen Punkt der Mitte kannst du an beliebiger Stelle auf der Fernbedienung anbringen. Das kleine farblich passende Oval, kann auf die Aussparung an der USB-Buchse auf dem Innenkern angebracht werden. Die Anbringung erfordert etwas Fingerspitzengefühl. Achte darauf, dass du die Klebefläche nicht mit deinen Fingern berührst, damit die Haftung nicht eingeschränkt wird.



Danach ist der Aufkleber blass durch die Außenhülle zu sehen und die **ichós** lassen sich gut voneinander unterscheiden.

Bedienung

Einschalten

Zum Einschalten halte den Taster am Nordpol 3 Sekunden lang gedrückt. **ichó** begrüßt dich mit einem Ton und die Lichter am Äquator leuchten auf.

Ausschalten

ichó wird normalerweise über die **⏻**-Taste der Fernbedienung (3 Sekunden drücken) ausgeschaltet, um ein versehentliches Ausschalten während einer Anwendung zu verhindern.

Sollte die Fernbedingung einmal nicht reagieren, kannst du durch sehr langes Drücken (20 Sekunden) der Taste am Nordpol **ichó** ebenfalls ausschalten.

Not-Aus


Die **⏻**-Taste dient während der Anwendungen zusätzlich als Not-Aus. Wird die Taste nur kurz während einer Anwendung gedrückt werden unmittelbar Licht, Klang und Vibration ausgeschaltet. Wird die **⏻**-Taste nochmals kurz betätigt, beginnt die zuvor ausgewählte Anwendung von vorne.

Menü



Ein Druck auf die -Taste bringt dich ins [Anwendungsmenü](#).

Mit der -Taste gelangst du in das [Profilmenü](#).




Play/Pause

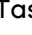Mit der -Taste bestätigst du entweder deine Auswahl im Profil- oder Anwendungsmenü. Innerhalb einer Anwendung kann die Taste eine andere Funktion haben.

Vor und Zurück

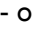Über die - oder -Tasten kannst du im Profil- oder Anwendungsmenü navigieren. Innerhalb einer Anwendung kann die Taste eine andere Funktion haben.

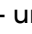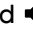


Lauter und Leiser

Über die - und -Taste im mittleren Bereich der Fernbedienung kannst du die Lautstärke regulieren. Sollte der Ton mal stören, kannst du ihn über die mittlere Taste () auch ganz aus- und einschalten.

Hell und Dunkel

Die Helligkeit von **ichó** stellst du ein, indem du die Tasten mit den Sonnen verwendest. Die obere Sonne steht für heller, die untere Sonne für dunkler.

Multifunktionstasten

Die drei farbigen Tasten    im unteren Bereich der Fernbedienung werden eingesetzt, um beispielsweise unterschiedliche Variationen einer Anwendung zu nutzen.

Sofern sie genutzt werden, findest du die entsprechenden Erklärungen in der jeweiligen Anwendungsanleitung auf der **agora**.

Menü


Damit deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt sind und ein hohes Maß an Individualisierung für viele Nutzer, Anwender und Einsatzgebiete gleichzeitig möglich ist, hat **ichó** zwei aufeinander aufbauende Menüebenen.

- Profilmenü - auf dieser Ebene sind anfangs bis zu vier verschiedene Profile hinterlegt.
- Anwendungsmenü - auf dieser Ebene sind anfangs bis zu acht verschiedene Anwendungen hinterlegt.

Insgesamt können also bis zu 32 verschiedene Anwendungen hinterlegt werden.

Profilmenü

Nach dem Startvorgang befindet sich **ichó** direkt im Profilmenü.

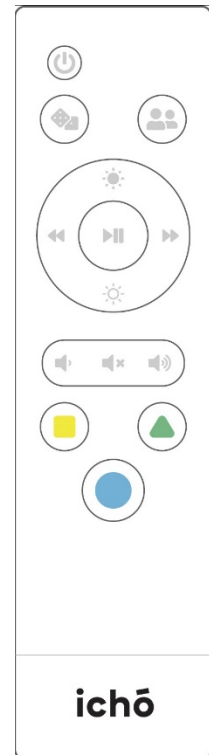

Da zu Beginn nur zwei von insgesamt vier möglichen Profilen auf deinem **ichó** angelegt sind, leuchten auch nur zwei Viertel von **ichó** in unterschiedlichen Farben auf. Die Farbe des ausgewählten Profils pulsiert.



Mit den ◀- oder ▶-Tasten kannst du zwischen den unterschiedlichen Profilen wechseln. Wenn du die ▶▶-Taste bestätigst, gelangst du in das zugehörige Anwendungsmenü mit den dort hinterlegten Anwendungen.

Über die Taste mit den Personen (👥-Taste) kommst du wieder zurück in das Profilmenu.

Anwendungsmenü

Wenn du dich für ein Profil entschieden hast und dieses über die ▶▶-Taste auswählst, leuchtet der Äquator in verschiedenen Farben auf und die zuletzt ausgewählte Anwendung pulsiert.

In dem Profil Blau befinden sich anfänglich die ersten fünf Starter-Anwendungen:

1. [Spektrum \(blau\)](#)
2. [Memory - Bauernhoftiere \(gelb\)](#)
3. [Drehorgel - Mix \(grün\)](#)
4. [Märchen - Der Froschkönig \(rot\)](#)
5. [Akkord \(türkis\)](#)



In dem Profil Gelb befinden sich anfänglich die nächsten fünf Starter-Anwendungen:

6. [Reise Reise \(blau\)](#)
7. [Sprichwörter - Lebensweisheiten \(gelb\)](#)
8. [Stadt Land Fluss \(grün\)](#)
9. [Knacks \(rot\)](#)
10. [Klanglandschaft - Wald \(türkis\)](#)

Du kannst nun diese Anwendung mit der ▶▶-Taste starten, oder eine andere Anwendung über die ◀- oder ▶-Tasten in die Vorauswahl nehmen und anschließend mit der ▶▶-Taste starten.

Über die 🎮-Taste gelangst du zurück ins Anwendungsmenü des ausgewählten Profils. Wenn du ein anderes Profil auswählen möchtest, nutzt du die 👥-Taste.

An dieser Stelle wünschen wir dir viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn du Tipps oder Anregungen hast, schicke uns diese gerne an: smutje@icho-systems.de

Aufladen


Der vollständig geladene **ichó** kann bis zu sechs Stunden durchgehend genutzt werden. Die Akkulaufzeit kann in Abhängigkeit von der Benutzung schwanken.

So lädst du deinen **ichó** auf:

1. Stecke das USB-C-Ladekabel in ein handelsübliches USB-Netzteil und schließe es an eine Stromquelle an.
2. Schließe das andere Ende des Ladekabels an die Buchse am Südpol von **ichó** an. Das Ladekabel muss sicher in der Buchse sitzen.

Ein regulärer Ladevorgang dauert etwa sechs Stunden. Ist **ichó** nach einer längeren Stand-by-Zeit stark entladen, kann der Ladevorgang bis zu zwölf Stunden dauern. Wenn du deinen **ichó** zugeschickt bekommst, empfehlen wir dir **ichó** eine ganze Nacht lang zu laden.

Es gibt zwei Möglichkeiten den Ladestatus deines **ichós** zu prüfen:

- Im ausgeschalteten Zustand kannst du dir durch kurzen Druck des Tasters am Nordpol den Ladestatus anzeigen lassen. Ist **ichó** komplett aufgeladen, leuchtet der gesamte Äquator grün. Ist er nur wenig geladen, leuchtet der Äquator überwiegend rot.
- Ist **ichó** in Benutzung, kannst du den Ladestatus mit einem Tastendruck auf die Multifunktionstaste  prüfen, solange du dich im Profil- oder Anwendungsmenü befindest. Dann leuchtet der Äquator dem aktuellen Ladezustand entsprechend mehr rot oder mehr grün auf.

Außenhülle lösen

Der Verschluss der Außenhülle ist so konzipiert, dass dieser während des Gebrauchs nicht versehentlich geöffnet werden kann. Allerdings kann das Lösen der Außenhülle vom Innenkern unter anderem notwendig werden, wenn diese zum Beispiel gründlich gereinigt werden soll, oder ein Neustart (Reset) von **ichó** notwendig ist.

Lege dafür **ichó** so vor dich hin, dass er auf dem Nordpol liegt und die Lautsprecheröffnungen nach oben zeigen. Schiebe dann das mitgelieferte Plek (Hilfswerkzeug) am Äquator zwischen die beiden Hälften der Außenhülle und drücke diese leicht auseinander. Schiebe das Plek noch ein kleines Stück weiter in die Öffnung und fahre in dieser Position einmal entlang des Äquators. Nun sollten sich die beiden Hälften bereits voneinander getrennt haben.

Nimm **ichó** in beide Hände und drehe ihn vor dir auf deiner Ablage um, sodass er auf dem Nordpol liegt. Nimm nun die obere Hälfte der Außenhülle ab. Anschließend kannst du den Innenkern aus der unteren Hälfte nehmen.

Zum Wiederverschließen der Außenhülle legst du die Außenschale mit den Lautsprecheröffnungen vor dir ab. Schaue dir nun die USB-Buchse an und positioniere sie so, dass sie in die dafür vorgesehene Öffnung passt.

Du merkst, dass der Innenkern richtig positioniert ist, wenn er sich leicht absenkt. Stülpe die zweite Außenschale über den noch freiliegenden Teil des Innenkerns und nimm **ichó** nun mit beiden Händen auf. Drücke die beiden Außenschalen sachte, aber bestimmt über den Widerstand der Führungsschienen hinweg zusammen, bis die Außenschalen wieder direkt aneinander anliegen. Verschiebe sie nun so lange gegenläufig, bis auch die Struktur der Außenhülle wieder übereinander passt und sich nicht weiter verschieben lässt.

ichó Support

ichó geht nicht mehr an


Sollte **ichó** beim Anschalten einmal nicht reagieren, prüfe zunächst den Ladestatus deines **ichós**. Schließe **ichó** dafür an eine Stromquelle an und drücke kurz auf den Taster am Nordpol. Leuchten alle Leuchtpunkte am Äquator rot, muss dein **ichó** geladen werden.


Sollte **ichó** einmal gar nicht mehr reagieren, ist ein Neustart das Mittel der Wahl. Dafür musst du die Reset-Taste drücken. Löse die Außenhülle vom Innenkern und drücke den kleinen, schwarzen, tiefergelegenen Knopf neben dem Haupttaster (zentral) am Nordpol von **ichó**. Nutze dafür einen spitzen Gegenstand, z.B. wie eine Büroklammer.

Die Fernbedienung funktioniert nicht


Es kann vorkommen, dass **ichó** sich nicht über die Fernbedienung ausschalten lässt. Dafür gibt es unterschiedliche Erklärungen:



1. Der Batteriestatus ist schwach oder die Batterie ist vollständig entladen.


Ein schwacher Batteriestatus wird durch schnelles Blinken der -Taste dargestellt. In diesem Fall solltest du die Batterien austauschen.


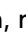
Die Batterien der Fernbedienung sind vollständig entladen. Dies kannst du prüfen, indem du eine beliebige Taste an der Fernbedienung drückst. Wenn die -Taste dabei nicht mit einem roten Blinken reagiert, müssen die Batterien getauscht werden.

2. Die voreingestellte Verbindung zwischen **ichó** und der Fernbedienung ist gestört.

Das erkennst du daran, dass die -Taste fünf Mal hintereinander aufleuchtet, wenn du eine beliebige Taste auf der Fernbedienung drückst. Um die Verbindung wiederherzustellen, starte an deinem **ichó** das Konfigurationsmenü, indem du **ichó** zunächst mit einer Stromquelle verbindest und dann den Taster am Nordpol von **ichó** für drei Sekunden drückst.

ichó leuchtet blau auf, wechselt dann mit akustischer Unterstützung in ein blaues Lauflicht. Jetzt befindet sich **ichó** im Verbindungsmodus. Damit die Verbindung zur Fernbedienung hergestellt werden kann, muss diese ebenfalls in den Verbindungsmodus gebracht werden. Drücke dafür gleichzeitig die - und -Taste der Fernbedienung für drei Sekunden.

Wenn die -Taste der Fernbedienung mehrfach kurz und anschließend pulsierend blinkt, befindet sie sich auch im Verbindungsmodus. Die beiden Geräte verbinden sich automatisch und **ichó** leuchtet bei erfolgreicher Verbindung grün. Anschließend startet **ichó** direkt.

Sollte die Verbindung zwischen **ichó** und der Fernbedienung nicht hergestellt worden sein, leuchtet **ichó** rot. **ichó** sucht automatisch weiter nach der Fernbedienung. Damit die Fernbedienung ebenfalls weiterhin versucht sich zu verbinden, müssen die beiden - und -Tasten erneut für 3 Sekunden gedrückt werden.

Falls **ichó** keine Fernbedienung findet, schaltet er sich nach drei Minuten aus. Wird der Taster am Nordpol für 20 Sekunden gedrückt, kann das Konfigurationsmenü vorzeitig beendet werden.

Du kannst den Verbindungsprozess so häufig starten, wie du möchtest. Gelingt es dir nicht die Verbindung wiederherzustellen oder treten weitere Probleme auf, melde dich gerne bei unserem Support unter: sos@icho-systems.de

Pflege

ichó ist robust, strapazierfähig und für den täglichen Gebrauch im Pflege- und Therapiealltag gemacht. Damit die Freude lange währt, beachte bitte folgende Pflegehinweise:

ichó muss vor der Reinigung von dem Ladekabel getrennt werden. Leichte Verschmutzungen auf der Außenhülle lassen sich oberflächlich mit einem feuchten Mikrofasertuch und warmen, milden Seifenwasser reinigen.

Bei starken Verschmutzungen empfehlen wir, die Außenhülle vom Innenkern zu lösen und diese dann unter fließend Wasser mit einer weichen Bürste zu reinigen. Wie du die Außenhülle vom Innenkern löst, kannst du [hier](#) nachlesen.

Allgemeine Informationen und Spezifikationen

Sensoren

Neben Bewegungssensoren sind auch Näherungssensoren verbaut, um den Anforderungen der verschiedenen Anwendungen zur Aktivierung und Förderung der motorischen und kognitiven Fähigkeiten gerecht zu werden.

Material

Die Außenhülle besteht aus einem strapazierfähigen, UV-beständigen und transluzenten Thermoplastischem Elastomer (kurz TPE).

Die Technik wird durch einen flexiblen Innenkern geschützt. Er ist aus einem Polycarbonat (kurz PC) gefertigt, ähnlich einer CD.

Funktechnik

ichó enthält ein kombiniertes WLAN- und Bluetooth Modul, welches die nachfolgenden Standards unterstützt:

Bluetooth: BT 2.1+EDR, and BLE 4.1

WLAN: IEEE 802.11 b/g/n

Haptische Rückmeldung

ichó verfügt über einen Vibrationsmotor, um zum Beispiel Menschen mit Sehenschränkungen eine haptische Rückmeldung geben zu können.

Leuchtmittel

Als Leuchtmittel wurden RGB-LEDs rund um den Äquator und zusätzlich im Inneren von **ichó** (ambient light) verbaut. Diese haben eine geringe Stromaufnahme und halten dadurch besonders lange.

Akku

ichó verfügt über einen fest verbauten NiMH-Akku (Nickel-Metallhydrid Akku). Dieser wird über das beiliegende Ladekabel in Verbindung mit einem handelsüblichen Netzteil geladen.

Speicher

ichó verfügt über einen internen Speicher von 16GB. Dies ist ausreichend, um eine Vielzahl von Anwendungen auf deinen **ichó** zu laden.

Warn- und Sicherheitshinweise

Warnhinweise

ichó ist so verarbeitet, dass er robust ist und auch die Belastungen im Pflegealltag aushält. Neben Streicheln, Fangen, Werfen hält **ichó** auch gelegentliche Stürze aus. Bitte beachte aber, dass es sich um ein technisches Gerät mit komplexer Sensorik handelt und nicht um ein Sportgerät.

ichó kann ein paar Spritzer Wasser abhalten, ist aber nicht wasserfest.

Der optimale Temperaturbereich für die Benutzung liegt zwischen +5 und +35 Grad Celsius.

ichó ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Sicherheitshinweise

ichó darf nur mit dem dazugehörigen Ladekabel, sowie einem Netzgerät, das maximal 15W liefert, geladen werden. Das Ladekabel muss regelmäßig auf Schäden überprüft werden. Bei Schäden muss das Ladekabel ausgetauscht werden.

Die im Gerät befindlichen Akkus sind fest im Innenkern verbaut. Ein Austausch oder Wechsel der Akkus durch den Nutzer/Anwender ist nicht vorgesehen. Ausschließlich der Hersteller kann einen Akkuwechsel vornehmen.

E-Mail: sos@icho-systems.de

EU-Konformitätserklärung

Produktname: ichó

Modell: Eleni-v1.0


Name des Herstellers: icho systems gmbh

Anschrift des Herstellers: Forsthausweg 1, 47057 Duisburg, Deutschland

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt die icho systems gmbh.

Produktabbildung und Modell:

Eleni-v1.0

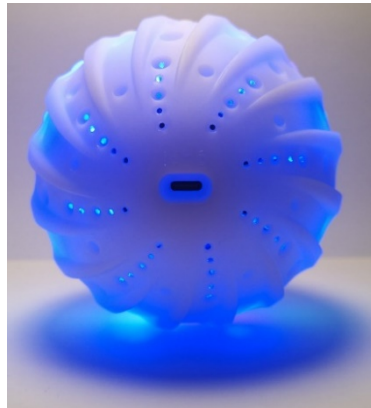

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

ROHS-Richtlinie: 2011/65/EU

Es wurden folgenden harmonisierte Normen angewandt:

EN 50581:2012

Funkanlagen-Richtlinie: 2014/53/EU

Es wurden folgende harmonisierte Normen angewandt:

Artikel 3.1a: Gesundheit und Sicherheit

EN 62368-1

EN 50566:2017

EN55035:2017

Artikel 3.1b: EMC

EN 301 489-1 v2.2.0

EN 301 498-3 V2.1.1

EN 301 498-17 V3.2.0

Artikel 3.2:

HF-Spektrumeffizienz

EN 300 328 V2.1.1 / V2.2.1

Zubehör:

USB-C Kabel EC006-T(Cloth)

Fernbedienung Icos

Software:

Eleni-v1.0

V0.9

Hinweis: nach dem Inverkehrbringen kann der Hersteller Firmware-Updates herausbringen, um Fehler zu korrigieren und den Funktionsumfang zu erweitern. Alle vom Hersteller herausgegebenen Firmwareversionen entsprechen nach wie vor den relevanten Vorschriften. Alle HF-Parameter sind für den Benutzer unzugänglich und können nicht von diesem verändert werden.

Unterzeichnet für und im Namen von:

icho systems gmbh

Ort: Duisburg

Datum: 15. Juni 2020

Name:

Funktion:

Unterschrift:

Mario Kascholke

Chief Technology Officer

Steffen Preuß

Chief Executive Officer

Starteranwendungen

So, jetzt wird es ernst und es kann losgehen.

ichó ist von Haus aus mit insgesamt 10 Starteranwendungen ausgestattet. Diese werden meist gemeinsam von Nutzer und Anwender gespielt. Der Nutzer ist derjenige der **ichó** in Händen hält. Der Anwender ist derjenige der die Anwendung leitet und die Fernbedienung in der Hand hält.

Profil 1

(Werkseinstellung blau)

Spektrum


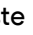

Beschreibung

Durch das Bewegen von **ichó** im Raum, egal ob nur im ganz Kleinen durch einen Finger oder mit großen Bewegungen des ganzen Körpers, verändert sich die Farbe von **ichó**.

Diese Anwendung eignet sich besonders für das erste Kennenlernen von **ichó**. In der Gruppe kann **ichó** einmal durch alle Hände wandern und die Nutzer sich so mit der Oberfläche und den ersten Funktionen vertraut machen.

Sie hat eine faszinierende und zugleich beruhigende Wirkung, die eine positive Grundstimmung erzeugt. Aber auch in der Einzelbetreuung und für geübte Nutzer sorgt diese Anwendung immer wieder für viel Freude zum Beispiel bei der gezielten Suche nach einzelnen Farben.

Bedienung

Wähle im Anwendungsmenü  -Taste über die  -Taste die Anwendung **Spektrum** (in der Werkseinstellung blau) aus und bestätige dies über die  - Taste.

Modus Gelb

Das Spiel startet automatisch im Standardmodus; die Fernbedienung wird während der Anwendung nicht benötigt. Alle Farben können grundsätzlich gesucht und gefunden werden. Bei manchen gelingt dies leichter, bei anderen schwerer.

Modus Grün

Sofern die vielen Farben und weichen Übergänge nicht geeignet sind, beispielsweise bei Menschen mit Seheinschränkungen, kann in den Alternativmodus gewechselt werden. Dieser besteht nur aus vier Farben mit klaren Übergängen.


Ratespiel - Bauernhoftiere

Beschreibung


Beim Schütteln von **ichó** erklingt ein Tierlaut, den es gilt zu erraten. Die Tierlaute sind häufig im ersten Moment nicht ganz eindeutig, man muss schon genau hinhören und manchmal auch ein zweites Mal (nochmal Schütteln). Dabei entstehen in der Gruppe häufig die interessantesten Gespräche durch Assoziationen, die bei den unterschiedlichsten Teilnehmern geweckt werden. So erinnert ein gackerndes Huhn vielleicht an die Jugend auf dem heimischen Bauernhof oder das Miauen an das geliebte Haustier. Diese Anwendung bietet bei nahezu allen Menschen Anknüpfungspunkte an das persönliche Leben.

Zudem bietet diese Anwendung die ideale Basis, um Kommunikation generationenübergreifend zu ermöglichen. So können beispielsweise Spielzeugtiere genutzt werden, die Kinder den Senioren beim richtigen Erraten des Tierlauts bringen.

Bedienung

Wähle im Anwendungsmenü  über die ►-Taste die Anwendung **Ratespie. - Bauernhoftiere** (in der Werkseinstellung gelb) aus und bestätige dies über die ►-Taste.

Modus Gelb

Durch ein Schütteln von **ichó** wird der erste Tierlaut abgespielt. Durch erneutes Schütteln kann der Tierlaut nochmals abgespielt werden. Der Anwender kann mit der ►-Taste schummeln und das Abspielen des Tierlautes aus der Ferne auslösen, auch wenn die notwendige Aktivierungsgeste ausbleibt. Mit der ►-Taste wird zum nächsten Tierlaut gewechselt. Dieser wird aber erst durch erneutes Schütteln abgespielt. Bei Bedarf lässt sich der vorherige Tierlaut über die ◀-Taste noch einmal auswählen. Die Auflösung erfolgt über die blaue Multifunktionstaste .

Modus Grün

Diese Anwendung kann autark eingesetzt werden, das heißt der Nutzer kann die Anwendung selbst steuern. Durch ein Schütteln von **ichó** wird der erste Tierlaut abgespielt. Über den Taster am Nordpol von **ichó** wird das Tier zum zugehörigen Tierlaut genannt und gleichzeitig zum nächsten Tierlaut weitergeschaltet. Der nächste Tierlaut wird bei erneutem Schütteln abgespielt.


Drehorgel - Mix

Beschreibung

Die Drehorgel ist der Klassiker unter den Anwendungen. Solange **ichó** bewegt wird, erklingt Musik und der Ball leuchtet grün. Lässt die Bewegung nach, beginnt **ichó** zunächst rot zu leuchten und hört schließlich auf Musik abzuspielen. Durch erneutes Bewegen wird die Musik weiter abgespielt. Auf diese Weise wird spielerisch die Aktivität gefördert und durch das Erlebnis der Selbstwirksamkeit ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, insbesondere dann, wenn die Lieblingsmusik abgespielt wird.

Neben dem Einsatz in der Gruppe bietet sich diese Anwendung sehr gut an, um die tägliche Pflegeroutine zu begleiten. Ungeliebte Tätigkeiten, wie Haare kämmen und Nägel schneiden, können durchgeführt werden, während Musik ertönt und die Aufmerksamkeit auf der Bewegung von **ichó** liegt.

Bedienung

Wähle im Anwendungsmenü  über die ►-Taste die Anwendung **Drehorgel** (in der Werkseinstellung grün) aus und bestätige dies über die ►-Taste.

Modus Gelb

Die Lieder werden in fester Reihenfolge abgespielt werden. Der Anwender kann mit der ►-Taste schummeln und das weitere Abspielen des Liedes aus der Ferne auslösen, auch wenn die notwendige Aktivierungsgeste ausbleibt. Mit den ◀ und ►-Tasten kann der Anwender innerhalb der Playlist ein Lied der Reihenfolge nach auswählen.

Modus Grün

Die Lieder werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Auch hier kann der Anwender mit der ►-Taste schummeln und das weitere Abspielen des Liedes aus der Ferne auslösen. Mit den ◀-Taste beginnt das jeweils letzte Lied nochmal und mit der ►-Taste startet das jeweils nächste Lied.

Modus Blau

Die Lieder werden abgespielt ohne, dass es notwendig ist, **ichó** in Bewegung zu halten.


Märchen - Der Froschkönig

Beschreibung

Der Froschkönig ist eines der bekanntesten deutschen Märchen, das in dieser Anwendung mit unterschiedlichen Licht- und Klangeffekten untermalt ist. Die einzelnen Kapitel sind zudem mit intuitiven Handlungsaufforderungen belegt. Hält das Märchen an, ist ein Schütteln notwendig, um das nächste Kapitel zu starten. Ist die Handlung ausgeführt, beginnt die nächste Etappe und man kann gespannt lauschen, wie es weitergeht.

Diese Anwendung ist besonders interaktiv und eignet sich gut für geübte Nutzer. Es werden in vergleichsweise schneller Abfolge abwechselnd kognitive und motorische Fähigkeiten gefordert.

Bedienung

Wähle im Anwendungsmenü  über die ►► -Taste die Anwendung Märchen - Der Froschkönig (in der Werkseinstellung rot) aus und bestätige dies über die ►|| - Taste.

Modus Gelb

Das jeweils nächste Kapitel wird abgespielt, wenn **ichó** geschüttelt bzw. bewegt wird. Der Anwender kann mit der ►|| - Taste schummeln und das Abspielen des nächsten Kapitels aus der Ferne auslösen, auch wenn die notwendige Aktivierungsgeste ausbleibt.

Modus Blau

Wenn die Geschichte einfach mal ohne Unterbrechung abgespielt werden soll, beispielsweise zur Entspannung, kannst du über den blauen Punkt in den Autoplay Modus wechseln.

Akkord

Beschreibung

Durch das Kippen von **ichó** in die vier Himmelsrichtungen wird jeweils ein Akkord abgespielt, der durch eine Farbe unterstützt wird.

Menschen, die aufgrund motorischer Einschränkungen nicht mehr in der Lage sind ein Instrument zu spielen, werden wieder befähigt Musik zu machen. Selbst die Menschen, die noch nie ein Instrument gespielt haben, aber schon immer Rhythmus im Blut hatten, fangen ganz intuitiv an, **ichó** in wohlklingenden Mustern zu bewegen. Sind mehrere **ichós** gleichzeitig im Einsatz, kann mit dieser Anwendung sogar ein kleines „Orchester“ kreiert werden.

Wie viele Anwendungen lässt sich auch diese einfach erweitern, indem beispielsweise bunte Kleidungsstücke der Gruppe oder farblich passende Gegenstände im Raum einbezogen werden und Klangmuster analog der jeweiligen Farbe entwickelt und nachgespielt werden.

Bedienung

Wähle im Anwendungsmenü  über die ►► -Taste die Anwendung Akkord (in der Werkseinstellung türkis) aus und bestätige dies über die ►|| - Taste.

Modus Gelb

Es werden die Akkorde mit dem Instrument Ukulele abgespielt.

Modus Grün

Es werden die Akkorde mit dem Instrument Gitarre abgespielt.

Modus Blau

Es werden die Akkorde mit dem Instrument Klavier abgespielt.

Profil 2


(Werkseinstellung gelb)




Reise Reise

Beschreibung

Über stimulierende Musik und Lichteffekte wird die Gruppe in Bewegung gebracht. Während **ichó** weitergereicht wird, bestimmen die Farben, in welche Richtung die Reise geht. Per Zufall leuchtet **ichó** in vier unterschiedlichen Farben. Bei blau wird **ichó** zum Beispiel nach links weitergereicht, bei grün nach rechts, bei gelb wird **ichó** dem Partner gegenüber zugerollt und bei Rot wird eine Sonderaktion ausgeführt. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Denkbare Aktionen sind Aufstehen und einmal um sich selbst drehen, **ichó** vor sich auf den Boden legen, mit **ichó** kuscheln, etc.

Bedienung

Wähle im Anwendungsmenü  über die **▶▶**-Taste die Anwendung **Reise Reise** (in der Werkseinstellung blau) aus und bestätige dies über die **▶▶**-Taste. Die Musik beginnt, aber **ichó** leuchtet noch nicht, bis die **▶▶**-Taste oder eine der Multifunktionstasten gedrückt werden, dann umrundet ein farbiges Lauflicht den Äquator und nach kurzer Zeit leuchtet zufällig eine von vier Farben auf. Drückt man die **▶▶**-Taste erneut, startet wieder das farbiges Lauflicht. Soll eine gezielte Farbe ausgewählt werden, nutzt man die Multifunktionstasten wie folgt:

- Wählt man statt der **▶▶**-Taste die  Funktionstaste, startet wieder das farbiges Lauflicht, das dann aber mit der Farbe Gelb endet.
- Wählt man statt der **▶▶**-Taste die  Funktionstaste, startet wieder das farbiges Lauflicht, das dann aber mit der Farbe Grün endet.
- Wählt man statt der **▶▶**-Taste die  Funktionstaste, startet wieder das farbiges Lauflicht, das dann aber mit der Farbe Blau endet.


Sprichwörter - Lebensweisheiten

Beschreibung


Sprichwörter raten und ergänzen ist eine unterhaltsame Beschäftigung, nicht nur bei Menschen mit Demenz. Fast alle Menschen können sich an das ein oder andere Sprichwort erinnern, da sie im Langzeitgedächtnis verhaftet sind. Manche Sprichwörter wecken Erinnerungen und nach und nach teilt fast jeder in der Gruppe ein Erlebnis aus seinem Leben und eine freudige Unterhaltung beginnt.

Durch Schütteln von **ichó** wird der Anfang gängiger Sprichwörter in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Gemeinsam wird das Sprichwort vervollständigt und bei Bedarf durch Tastendruck aufgelöst. Die Anwendung setzt sich mit dem Anfang eines neuen Sprichwortes fort.

Bedienung

- Wähle im Anwendungsmenü  über die **▶▶**-Taste die Anwendung **Sprichwörter - Lebensweisheiten** (in der Werkseinstellung gelb) aus und bestätige dies über die **▶▶**-Taste.

Standardmodus 

Der Beginn des ersten Sprichwortes wird abgespielt, wenn **ichó** geschüttelt wird. Gelingt es einem Nutzer nicht, die notwendige Aktivierungsgeste auszuführen, kann der Anwender über die **▶▶**-Taste schummeln. Der Anwender steuert mit der Fernbedienung die Auflösung des jeweiligen Sprichwortes über die  Funktionstaste. Mit der **▶▶**-Taste gelangt man zum

nächsten Sprichwort. Bei Bedarf lässt sich das vorherige Sprichwort über die ◀-Taste noch einmal auswählen.

Alternativmodus I ▲

Diese Anwendung kann autark eingesetzt werden, das heißt der Nutzer kann die Anwendung selbst steuern. Über den Taster am Nordpol von **ichó** kann die Vervollständigung des Sprichwortes ausgelöst und gleichzeitig der Anfang des nächsten Sprichwortes gestartet werden.


Stadt Land Fluss

Beschreibung

Das beliebte und kurzweilige Denkspiel sorgt stets für Vergnügen bei Jung und Alt. Durch Schütteln von **ichó** wird per Zufall ein Buchstabe und eine Kategorie vorgegeben, zu der dann gemeinsam die Lösung gefunden werden muss. Sollte dies einmal nicht gelingen, besteht immer die Möglichkeit, sich eine von vielen Antworten geben zu lassen.

Diese Anwendung eignet sich gut, um das geographische (semantische) Gedächtnis zu trainieren. So kann in fortgeschrittenem Stadium über eine Variation der Anwendung die Anzahl der richtigen Lösungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums dokumentiert werden.

Bedienung

Wähle im Anwendungsmenü  über die ▶-Taste die Anwendung **Stadt Land Fluss** (in der Werkseinstellung grün) aus und bestätige dies über die ▶▶-Taste.

Modus Gelb ■

Die erste Aufforderung wird abgespielt, wenn **ichó** geschüttelt wird. Gelingt es einem Nutzer nicht, die notwendige Aktivierungsgeste auszuführen, kann der Anwender über die ▶▶-Taste schummeln und die Aufforderung auslösen. Eine mögliche Antwort zu der jeweiligen Buchstaben-Kategorie-Kombination wird gegeben, wenn ● Funktionstaste gedrückt wird. Mit der ▶-Taste gelangt man zur nächsten Aufforderung. Bei Bedarf lässt sich die vorherige Buchstaben-Kategorie-Kombination über die ◀-Taste noch einmal auswählen.

Modus Grün ▲

Diese Anwendung kann autark eingesetzt werden, das heißt der Nutzer kann die Anwendung selbst steuern. Über den Taster am Nordpol von **ichó** kann eine mögliche Antwort ausgelöst werden und gleichzeitig der Anfang der nächsten Frage gestartet werden.


Knacks

Beschreibung

In dieser Anwendung reagiert **ichó** mit Farbveränderung und Vibration auf Drehen und Wenden des Balls. Sie ist besonders gut geeignet, wenn die Sehkraft nachlässt. Ziel der Anwendung ist es, genau die Position zu finden, bei der **ichó** am stärksten vibriert. Ist diese gefunden, gibt **ichó** ein akustisches Signal und eine haptische Rückmeldung. Automatisch verschiebt sich dann der Punkt mit der stärksten Vibration und kann erneut durch Drehen und Wenden von **ichó** gesucht werden.

Diese Anwendung kann auch gut genutzt werden, um die Konzentrationsfähigkeit zu fördern. So kann in fortgeschrittenem Stadium über eine Variation der Anwendung die Anzahl der „geknackten Schlösser“ innerhalb eines bestimmten Zeitraums dokumentiert werden.

Bedienung

Wähle im Anwendungsmenü  über die ▶-Taste die Anwendung **Knacks** (in der Werkseinstellung rot) aus und bestätige dies über die ▶▶-Taste.

Modus Gelb ■

Gelingt es dem Nutzer nicht durch Drehen und Wenden von **ichó** den stärksten Punkt der Vibration zu finden, kann der Anwender über die **▶▶** - Taste einen zufälligen, neuen Vibrationspunkt festlegen.

Modus Grün ▲

Sobald der Anwender den Modus ▲ auswählt, beginnt die Zeit zu laufen und der Nutzer ist aufgefordert, innerhalb der nächsten fünf Minuten so viele „Schlösser“ wie möglich zu knacken. Nach Ablauf der Zeit wird die Anzahl der erfolgreich geknackten Schlösser über die Sprachausgabe von **ichó** ausgegeben.


Klanglandschaft - Wald

Beschreibung


Unser Alltag ist geprägt von einer Kultur des Sehens, dadurch werden wir im Laufe des Lebens vergleichsweise unsensibel in Bezug auf die uns umgebenden Geräusche, die nicht selten einfach nur als Lärm wahrgenommen werden. Um den achtsamen Umgang mit den Ohren zu trainieren und den Gehörsinn zu sensibilisieren, bietet sich ein gemeinsamer „Hörspaziergang“ mit **ichó** durch eine der spannenden Klanglandschaften an. Dabei erinnert bestimmt das ein oder andere Geräusch an vergangene Tage oder lädt zum Träumen ein.

Die Anwendung eignet sich besonders gut für den Abschluss einer Betreuungseinheit, kann aber genauso gut auch in der Einzelbetreuung eingesetzt werden, beispielsweise zur Entspannung nach einer anstrengenderen Aktivität.

Bedienung

Wähle im Anwendungsmenü  über die **▶▶** -Taste die Anwendung **Klanglandschaft - Wald** (in der Werkseinstellung türkis) aus und bestätige dies über die **▶▶** - Taste.

Modus Gelb ■

Die typische Geräuschkulisse eines **Waldes** wird wiedergegeben, unterstützt durch beruhigende visuelle Impulse. Die Anwendung wird solange abgespielt, bis diese über die **▶▶** - Taste unterbrochen oder über die  -Taste das Menü wieder angewählt wird.

Modus Grün ▲

Die Anwendung Klanglandschaft - Wald wird für 10 Minuten abgespielt und stoppt dann.

Modus Blau ●

Die Anwendung Klanglandschaft - Wald wird für 30 Minuten abgespielt und stoppt dann.

ichó individualisieren über die agora

Die **agora** ist die zentrale Software von **ichó**. Hier kannst du deinen **ichó** individualisieren und an verschiedene Bedürfnisse anpassen, indem du neue Anwendungen auswählst und sie unterschiedlichen Profilen zuordnest.

Die **agora** befindet sich noch im Aufbau, der Grundstein ist gelegt und nach und nach wächst sie zu einem bunten, kommunikativen Forum heran. Hier können alle **ichónauten** (das seid ihr) voneinander profitieren, indem Ideen ausgetauscht, Tipps gegeben und immer neue Anwendungen vorgestellt werden.

Kundenkonto anlegen

Um deinen **ichó** zu individualisieren, benötigst du ein Kundenkonto, mit dem du alle deine **ichós** verwalten kannst.

Das Kundenkonto kannst du online über die Webadresse **agora.icho-systems.de** anlegen. Für die Einrichtung des Kundenkontos benötigst du eine E-Mail-Adresse und ein sicheres Passwort.

Um vollständig auf die **agora** zugreifen zu können, musst du deine E-Mail Adresse bestätigen. Hierzu erhältst du von uns eine Bestätigungsmail. Öffne diese E-Mail und klicke auf den Link „**E-Mail bestätigen**“. Der Link steht dir 10 Tage zur Verfügung.

Solltest du keine E-Mail erhalten haben, prüfe, ob diese ggf. in deinem Spam-Postfach gelandet ist, oder fordere über die Webseite eine neue Bestätigungsmail an.

ichó registrieren

Wenn du die Einrichtung deines Kundenkontos erfolgreich abgeschlossen hast, gelangst du auf die Startseite der **agora**. Hier findest du direkt die Möglichkeit, deinen **ichó** zu registrieren. Klicke hierzu auf die graue Schaltfläche „hinzufügen“ unter „Meine ichós“.

Jetzt benötigst du die Seriennummer deines neuen **ichós**. Diese findest du auf der mitgelieferten Bedienungsanleitung und dem Produktkarton. Zusätzlich ist sie auf dem Innenkern des **ichós**, in der Nähe des USB-Anschlusses, angebracht. Schau dir dazu den Abschnitt [Außenhülle lösen](#) an.

Hast du eine gültige Seriennummer eingegeben, erkennst du dies an dem grünen Bestätigungshaken.

Wenn du magst, kannst du deinem **ichó** einen eigenen Namen geben. Hast du mehrere **ichós**, kannst du sie so einfacher auseinanderhalten. Ansonsten erhält dein **ichó** den vorgeschlagenen Namen.

In jedem Fall musst du deinem **ichó** ein Farbschema zuordnen. Zur Auswahl stehen sechs Farben, die du auch auf dem mitgelieferten Aufkleber-Set wiederfindest.

Abschließend speicherst du über das Feld „Speichern“ deine Eingaben und der **ichó** ist deinem Konto hinzugefügt.

Anwendungen auswählen

Auf der Seite Apps findest du alle Anwendungen mit einer Kurzbeschreibung und Kategorisierung, die für **ichó** verfügbar sind. Mit Hilfe der unterschiedlichen Filtermöglichkeiten kannst du die Auswahl entsprechend dem jeweiligen Förderschwerpunkt einschränken.

Alle Anwendungen, die du auswählst, werden zunächst in einer Vorauswahl gespeichert. So kannst du im nächsten Schritt gezielt die Anwendungen deinem **ichó** und den jeweiligen

Profilen zuordnen. Grundsätzlich kannst du so viele Anwendungen in die Vorauswahl nehmen, wie du möchtest.

ichó individualisieren

Im nächsten Schritt kannst du deinen **ichó** individualisieren. Wähle zunächst einen deiner registrierten **ichós** aus und klicke auf das Feld „ichó auswählen“.

Hierdurch wird das erste Profil deines **ichós** sichtbar und kann eingestellt werden.

Wenn du möchtest, kannst du für das Profil einen eigenen Namen vergeben und Anwendungen aus deiner Vorauswahl den 8 Plätzen in diesem Profil zuordnen.

Sobald du eine Anwendung dem Profil zugeordnet hast, kannst du durch Klicken auf die Schaltfläche „Profil hinzufügen“ ein weiteres Profil anlegen.

Es können bis zu vier Profile pro **ichó** angelegt werden. Du kannst die gleichen Anwendungen auch in mehreren Profilen verwenden.



Deine Individualisierung für: Stationär 1. OG Am Klippersweg



1. Profil (blau)	2. Profil (orange)	3. Profil (grün)	4. Profil (lila)
Morgenaktivierung	Mittagsruhe	Christel Wern	Heinz Albers
1. Anwendung: Spektrum	1. Anwendung: Knacks	1. Anwendung: Memory - Bauernhof...	1. Anwendung: Akkord
2. Anwendung: Memory - Bauernhof...	2. Anwendung: Sprichwörter - Leben...	2. Anwendung: Knacks	2. Anwendung: Sprichwörter - Leben...
3. Anwendung: Drehorgel - Mix	3. Anwendung: Stadt Land Fluss	3. Anwendung: Akkord	3. Anwendung: Reise Reise
4. Anwendung: Märchen - Der Fro...	4. Anwendung: Reise Reise	4. Anwendung: [unbekannt]	4. Anwendung: Drehorgel - Mix
5. Anwendung: Akkord	5. Anwendung: Klanglandschaft - W...	5. Anwendung: [unbekannt]	5. Anwendung: Märchen - Der Fro...
6. Anwendung: [unbekannt]	6. Anwendung: [unbekannt]	6. Anwendung: [unbekannt]	6. Anwendung: Memory - Bauernhof...
7. Anwendung: [unbekannt]	7. Anwendung: [unbekannt]	7. Anwendung: [unbekannt]	7. Anwendung: Spektrum
8. Anwendung: [unbekannt]	8. Anwendung: [unbekannt]	8. Anwendung: [unbekannt]	8. Anwendung: [unbekannt]
Profil löschen	Profil löschen	Profil löschen	Profil löschen

Individualisierung abschließen

Hast du mehr als einen **ichō** in deinem Konto registriert, kannst du die vorher durchgeführte Individualisierung kopieren und somit auf deinen zweiten **ichō** übertragen. Klicke hierzu auf das kleine Kopieren-Symbol neben der Mülltonne.

Ist deine Auswahl abgeschlossen, klicke auf die Schaltfläche „Individualisierung abschließen“ und du gelangst zur Zusammenfassung deiner Individualisierung.

Zusammenfassung

Hier siehst du noch einmal als Übersicht, alle deine individualisierten **ichōs**.

Als Beispiel kann eine Individualisierung von zwei **ichōs** so aussehen:

Tagespflege EG		Anwendung							
Profilname	Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
Morgen-aktivierung	1	Spektrum	Memory-Bauernhofiers	Dehrgel-Mis	Mäuschen-Der-Froschkönig	Akkord			
Mittagsruhe	2	Knacks	Sprachwörter-Lebensweisheiten	Stoß-Land-Fluss	Reise-Reise	Klingelndschiffen-Wald			

Stationär 1. OG Am Kleppersweg		Anwendung							
Profilname	Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
Morgen-aktivierung	1	Spektrum	Memory-Bauernhofiers	Dehrgel-Mis	Mäuschen-Der-Froschkönig	Akkord			
Mittagsruhe	2	Knacks	Sprachwörter-Lebensweisheiten	Stoß-Land-Fluss	Reise-Reise	Klingelndschiffen-Wald			
Christel Wern	3	Memory-Bauernhofiers	Knacks	Akkord					
Heinz Albers	4	Akkord	Sprachwörter-Lebensweisheiten	Reise-Reise	Dehrgel-Mis	Mäuschen-Der-Froschkönig	Memory-Bauernhofiers	Spektrum	

Diese Übersicht kannst du dir als PDF sichern und ausdrucken. Die Übersicht kann dir in der täglichen Anwendung helfen, den Überblick über die verschiedenen Individualisierungen deiner **ichōs** zu behalten.

Bitte beachte, dass diese Übersicht nicht gespeichert wird und nur an dieser Stelle heruntergeladen werden kann.

Wenn du mit deiner Individualisierung zufrieden bist, drücke auf die Schaltfläche „Individualisierung bestätigen“.

Liefer- und Zahlungsinfo

Bevor du deine Individualisierung bestellen kannst, prüfe deine Rechnungs- und Lieferadresse. Falls nötig, kannst du hier deine Rechnungsadresse ändern und auch eine abweichende Lieferadresse angeben.

Sind alle Angaben korrekt, kannst du im nächsten Schritt die gesamte Bestellung prüfen und abschließen. Klicke hierzu auf „Bestellung prüfen“.

Bestellabschluss

Im letzten Schritt deiner Individualisierung sind alle relevanten Informationen zusammengefasst. Sofern du einen Service- oder Gutscheincode hast, kannst du diesen in das gleichnamige Feld eingeben und einlösen.

Nach Bestätigung der AGB, Datenschutz und Widerrufsbelehrung, kannst du deine Bestellung abschließen.

ichó einschicken

Für den Individualisierungsvorgang schickst du deinen **ichó** an uns zurück (einen Retourenschein erhältst du mit der Auftragsbestätigung). Wir bereiten alles Notwendige vor, damit du nur kurz auf deinen **ichó** verzichten musst. Nach wenigen Tagen erhältst du deinen **ichó** inklusive der neuen Anwendungen und Profile zurück.